


『犬用ワクチチェック』の使用方法



1. 検査準備



① 使用前に 20 ~ 25°Cに戻す

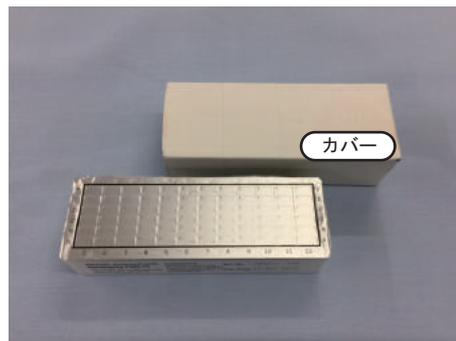

② 反応用プレートを静かにゆすり中の溶液を混和する

検査時の操作ミスを防ぐために
また反応用プレートの保管のために
薬の箱などでカバーをご利用ください

2. 検査手順



① コームカードを取り出す



② 付属のピンセットでA槽を押し破る
1検体につき1か所開封する

余分な穴を開けないように
薬の箱などでカバーをしてください



③ 検体を規定量入れ、
数回ピペティングして混和する



④ コームカードを検体の数だけ切り取る
(写真は2検体分)

残ったコームカードはアルミニウムパウチ包装に
戻してください



⑤ タイマーをセット

A槽：5分、B槽：2分、C槽：5分、D槽：2分
E槽：2分、F槽：5分、E槽：2分（2回目）




⑥ A槽にコームカードを浸漬させ、
上下に数回小刻みに動かす

続く


『犬用ワクチチェック』



続き

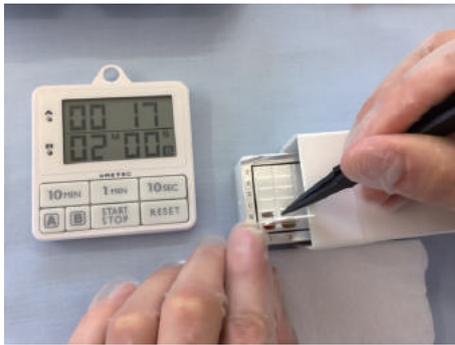

⑦ A 槽の浸漬が終わる前に B 槽を開封して準備する

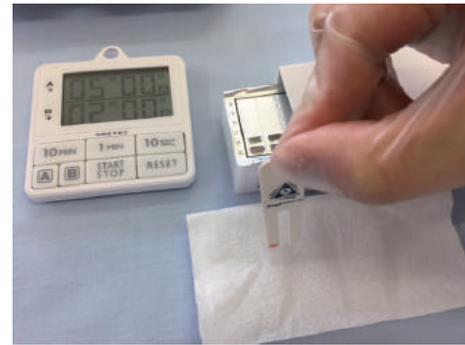

⑧ 次の槽に移す際は余分な液をティッシュペーパーなどの上に静かに振り落とす




⑨ B,C,D,E,F 槽へと同様の手順でコムカードを移動させる



⑩ F 槽終了後コムカードを反応停止のため E 槽にて2分間浸漬した後風乾する

💡 コムカードを吸い取る位置は、槽に少しずらしず、ずらしていただくこと

3. 判定の手順

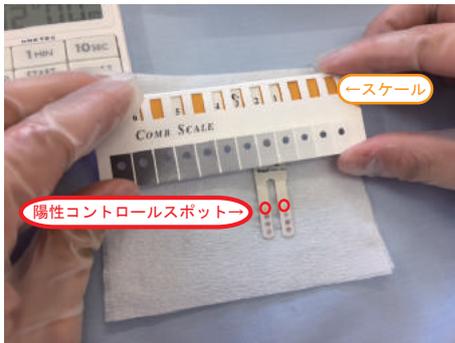


① 判定のためコムスケールを用意



② 丸窓の裏側からコムカードの一番手元の陽性コントロールスポットを覗かせながら最も近い濃淡の紫灰色を探すスケールをスライドさせ、その丸窓の上にある四角窓に C+3 を合わせ固定する

💡 スケールはすべての結果を判定するまで動かさないでください

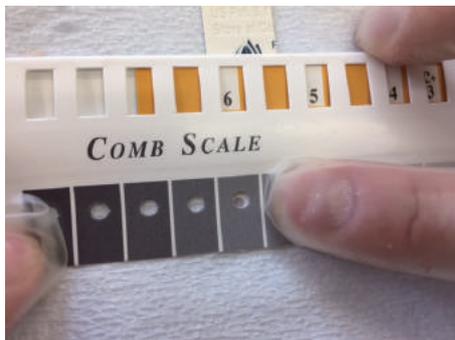

③ 各スポットの色を四角窓に見える1~6のスコアで読み取る



④ カルテ用シール、抗体検査結果に必要な事項を記入する

詳細はキットに同封されている使用説明書をよく読んでご使用ください