

# ワクチンチェック外注サービス案内



## 概要

ワクチンチェック外注サービスは、犬もしくは猫の血清・血漿中のIgG抗体を検出します。  
犬アデノウイルス(CAV)・犬パルボウイルス(CPV)・ジステンパーウイルス(CDV)・猫パルボウイルス(FPV)

## 特長

- ◆少量の検体で測定可能！血清又は血漿0.1ml
- ◆迅速な結果！午前中に届いた検体は、当日結果報告！（営業日のみ）

## 測定方法

DOT-BLOT ELISA 法を用いた判定量検査

## 結果報告

スコア	0	1	2	3	4	5	6
結果	陰性			陽性			

## 判定基準

スコア3の陽性及び陰性カットオフ値

・CDV 中和抗体価32倍 ・CAV 中和抗体価16倍 ・CPV HI抗体価80倍 ・FPV HI抗体価80倍

## 性能: 感度・特異度

	感度	特異度	一致度	
CDV	100.0%	88.9%	96.5%	n=230
CAV	95.4%	93.0%	95.2%	n=208
CPV	90.6%	96.5%	91.7%	n=228
FPV	90.4%	97.8%	95.7%	n=444

感度: 少量の抗体・抗原を検出する能力  
特異度: 正確に抗体・抗原を検出する能力

項目名	動物種	測定方法	検体量	保存方法	報告日数	結果報告
犬アデノウイルス抗体	犬	ELISA	血清/血漿 0.1ml	常温/冷蔵	当日~翌営業日 (午前着は当日報告)	陰性/陽性
犬パルボウイルス抗体						
ジステンパーウイルス抗体						
猫パルボウイルス抗体	猫					

## 検体送付方法

- ✓0.1mL の血清もしくは血漿を、バイアルに入れて、依頼書を同封の上、弊社宛にお送りください。
- ✓依頼書は弊社HPでダウンロードできます。
- ✓冷蔵もしくは常温どちらでもお送りいただけます。
- ✓弊社ではバイアルのご用意はしておりません。お手持ちの容器をお使いください。
- ✓検体の漏れがないよう、キャップをしっかり閉め、ビニールテープやパラフィルムでシールし、チャック付きビニール袋に入れてください。
- ✓割れないよう、緩衝材等で保護してください。輸送中の容器破損等の責任は負いません。



検体送付用バイアル(例)

送付先: 〒152-0034  
東京都目黒区緑が丘1-5-22-201  
スペクトラム ラボ ジャパン株式会社 宛

○ 結果は、検体到着が午前中の場合は当日、午後の場合は翌営業日までに、Eメール又はFAXにて報告いたします。営業日のみの結果報告となりますので、休業日にご注意ください。

○ 本サービスには、スペクトラムラボジャパン(株)の登録が必要となります。  
ご請求に関しましては、結果報告日の月末に締めさせていただき、翌月初旬に請求書をお送りいたします。

## <<ご注意>>

- ・ 検体送料は病院様負担をお願いいたします。着払いの場合は、サービス料金と一緒に請求いたします。
- ・ お預かりしました検体は、結果報告後1週間冷蔵保存し、保管期間を過ぎた検体は処分します。

解析元・問い合わせ先:  
スペクトラム ラボ ジャパン株式会社  
Tel : 03-5731-3630 / E-mail : sljsupport@slj.co.jp

